



	NOME	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	Del Bravo/Pieraccini	TSLB	25/11/2020
VERIFICA	Gianfranco Avveduto	RAQ	25/11/2020
APPROVAZIONE	Pezzati Paola	DIRETTORE SOD	25/11/2020

ETANOLO/AMMONIO

Descrizione prodotto

Il materiale di controllo in forma liquida è pronto per l'uso ed è prodotto a partire da materiale di origine umana.

Si raccomanda di trattare il materiale con le stesse modalità e precauzioni usate per la manipolazione di reagenti di laboratorio. Si ricorda di trattare i controlli con le medesime modalità e precauzioni usate per i campioni prelevati da pazienti.

Conservazione

Il materiale nella confezione integra, se conservato a +2/+8 C°, è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta.

Trattamento materiali

Assicurarsi che i campioni siano omogenei agitandoli leggermente prima dell'uso.
Non scuotere le fiale.

Dopo l'apertura della fiala il materiale deve essere analizzato immediatamente.

Se correttamente risigillato e conservato a +2/+8°C può essere conservato 8 ore.

Si consiglia di dosare l'etanolo non appena aperto il contenitore .

Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti.

Stabilità dopo apertura del flacone

temperatura ambiente	/
+2/+8 C°	8h
-20 C°	/