



V.E.Q.

	NOME	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	Gianfranco Avveduto	RAQ	
VERIFICA	Alessandro Terreni	RP	
APPROVAZIONE	Pezzati Paola	DIRETTORE SOD	

MARCATORI CARDIACI

Descrizione prodotto

Il materiale di controllo, in forma liofila, è preparato a partire da siero umano.

La Ditta fornitrice attesta che i materiali sono negativi ai test di ultima generazione per la ricerca dell'HBsAg, dell'Ab anti-HCV e dell'Ab anti-HIV.

Si raccomanda tuttavia di trattare i controlli con le medesime modalità e precauzioni usate per i campioni prelevati da pazienti.

Conservazione

Il materiale nella confezione integra, se conservato a +2/+8 C°, è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta.

Trattamento materiali

Mantenere i flaconcini a temperatura ambiente per 30 minuti.

Aggiungere 1.0 mL di acqua distillata a temperatura ambiente.

Lasciare riposare 15-20 minuti.

Miscelare per inversione capovolgendo delicatamente il flacone evitando di produrre schiuma.

Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti riguardanti i rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti.

Stabilità dopo ricostituzione

L'analita TROPONINA T deve essere tassativamente analizzato entro un'ora dalla ricostituzione.
Per tutti gli altri analiti vale quanto riportato nella seguente tabella:

temperatura ambiente	8h
+2/+8 C°	7 gg
-20 C°	1 mese