



**V.E.Q. SANGUE OCCULTO**

	NOME	FUNZIONE	DATA
<b>REDAZIONE</b>	Avveduto Gianfranco	RAQ	
<b>VERIFICA</b>	Terreni Alessandro	Responsabile Produzione	
<b>APPROVAZIONE</b>	Pezzati Paola	DIRETTORE SOD	

## **SANGUE OCCULTO**

### **Descrizione prodotto**

Il materiale di controllo, in forma liquida, è di origine umana.

La Ditta fornitrice attesta il materiale è risultato Negativo a HBsAg, antiHIV 1-2 e antiHCV con test approvati da FDA e/o IVD marcati CE. In ogni caso, dato che nessun test può offrire la certezza che prodotti derivanti da sangue umano non trasmettano infezioni, si raccomanda di considerare i campioni come potenzialmente infettivi.

Si raccomanda quindi di trattare i controlli con le medesime modalità e precauzioni usate per i campioni prelevati da pazienti.

### **Conservazione**

Il materiale nella confezione integra, se conservato a +2/+8 C°, è stabile fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta.

### **Trattamento materiali**

**Il materiale, in forma liquida, è pronto all'uso.**

Prima di dispensare il campione riportarlo a temperatura ambiente. I controlli non possono essere congelati.

Il prodotto deve essere smaltito secondo le normative vigenti riguardanti i rifiuti ospedalieri potenzialmente infetti.



### ***Stabilità dopo ricostituzione***

temperatura ambiente	/
+2/+8 C°	60 gg
-20 C°	/